

Dezinfektuesit dhe solucionet e pastrimit për sistemet me ultratinguj dhe transduktorët

Solucioni/ Sistemi	Shteti ose rajoni i origjinës	Përdorimi i kualifikuar	Përbërësi aktiv	Lloji i dezinfektues it	Kolonat e përputhshmërisë							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Protex Disinfectant (të gjitha llojet)	US	Spërkatje/fshirje	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Proxy P/ Proxy A	AU	AR	Acid peracetik	HLD	N	N	N	N	T	N	N	N
Amon kuaternar (maks. 0,8% aktiv)	Të gjitha	Spërkatje/fshirje	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
RAPICIDE Glut	US	Njomje ¹	Glutaraldeid	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
RAPICIDE OPA/28	US	Njomje ¹	Ortoptalaldehid	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
RAPICIDE PA	US	Njomje ¹	Acid peracetik	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	N
RAPICIDE PA Single Shot	US	AR	Acid peracetik	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	N
Revital-Ox RESERT	US	Njomje ¹	Peroksid hidrogjeni	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T ³	T	T	N	T
Rivascop	FR	Spërkatje/fshirje	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Salvanios pH 10	FR	Spërkatje/fshirje	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-24	US	Spërkatje/fshirje	Alkool, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sani-Cloth Active	DE	Fshirje	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C

Solucioni/ Sistemi	Shteti ose rajoni i originjës	Përdorimi i kualifikuar	Përbërësi aktiv	Lloji i dezinfektues it	Kolonat e përputhshmërisë							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Sani-Cloth AF	US	Fshirje	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth AF3	US	Fshirje	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth Bleach	US	Fshirje	Hipoklorit natriumi	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
Sani-Cloth CHG 2%	UK	Spërkatje/fshirje	Alkool, glukonat klorheksidine	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sani-Cloth HB	US	Fshirje	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth Plus	US	Fshirje	Alkool, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sani-Cloth Prime	US	Fshirje	Alkool, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sekucid N	FR	Njomje ¹	Glutaraldeid	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Sekusept Aktiv	DE	Njomje ¹	Acid peracetik	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Sekusept Easy	DE	Njomje ¹	Acid peracetik	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Sekusept Plus	DE	Njomje ¹	Glukoprotaminë	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Serie TEE	FR	AR	Në varësi të solucionit	HLD	N	N	N	T ⁷	T ⁷	N	N	N
Soluscope P/ Soluscope A	FR	AR	Acid peracetik	HLD	N	N	N	N	T	N	N	N
Peceta Sono Ultrasound	US	Fshirje	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Steranios 2%	FR	Njomje ¹	Glutaraldeid	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
STERRAD 100S	US	AR	Peroksid hidrogjeni	S	N	N	N	N	N	T ⁶ ,C, H	N	N

Solucioni/ Sistemi	Shteti ose rajoni i originës	Përdorimi i kualifikuar	Përbërësi aktiv	Lloji i dezinfektues it	Kolonat e përputhshmërisë							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Super Sani-Cloth	US	Fshirje	Alkool, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
TD-5	US	Reprocesor TD-100, reprocesor TEEClean	Glutaraldeid	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TD-8	US	Reprocesor TD-100, reprocesor TEEClean	Ortoptaldehid	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TD-12	US	Reprocesor TD-200	Acid peracetik	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TEEZyme	US	Reprocesor TEEClean	Enzima, surfaktant	CL	N	N	N	T,C,H	T,C,H	N	N	N
Sfungjer TEEZyme	US	Pastrues paraprak	Enzima, surfaktant	CL	N	N	N	T,C,H	T,C,H	N	N	N
TEEZymeMC	US	Pastrues paraprak	Enzima, surfaktant	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Tristel Duo	UK	Shkumë/fshirje	Dyoksid klori	HLD	T,C	T,C	N	N	N	N	T,C	T,C
Tristel Fuse for Stella	UK	Sistemi Stella	Dyoksid klori	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Tristel Multi- Shot	UK	Njomje ¹	Dyoksid klori	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T

Solucioni/ Sistemi	Shteti ose rajoni i originjës	Përdorimi i kualifikuar	Përbërësi aktiv	Lloji i dezinfektues it	Kolonat e përputhshmërisë							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Tristel Sporicidal Wipes	UK	Fshirje	Dyoksid klori	HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Tristel Trio Wipes / Tristel Trio Trace	UK	Fshirje paraprake, fshirje sporocidale, fshirje për shpëlarje	Enzima, surfaktant, dyoksid klori	CL, HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T
trophon2	AU	Reprocesor trophon2	Peroksid hidrogjeni	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	N	N	T,C ⁸	T,C
Peceta pastruese shoqëruese trophon	AU	Fshirje	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
trophon EPR	AU	Reprocesor trophon EPR	Peroksid hidrogjeni	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	N	N	T,C ⁸	N
Vaposeptol	FR	Spërkatje/fshirje	Alkool, biguanid	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Virox 5 RTU	CA	Fshirje	Peroksid hidrogjeni	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wavicide -01	US	Njomje ¹	Glutaraldeid	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Wip'Anios Excel	FR	Fshirje	QUAT, biguanid, surfaktant	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wip'Anios Premium	FR	Fshirje	QUAT, biguanid, surfaktant	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C

1. Mos e zhysni apo njomni asnjëherë një bashkues. Këto produkte mund të përdoren në reprocesorët e automatizuar (AR) sipas procedurave në dokumentin *Kujdesi dhe pastrimi për sistemet me ultratinguj dhe transduktorët*.
2. Antigermix S1 dhe Hypernova Chronos nuk janë të miratuara për 3D6-2, 3D8-4, V6-2, V8-4, V9-2, VL13-5 ose VL13-5 Compact.
3. Oxygenon-I dhe Revital-Ox RESERT mund të krijojnë një ndryshim të lehtë të ngjyrës në boshtin elastik të transduktorëve S7-3t dhe S8-3t. Ky ndryshim i ngjyrës nuk ka ndikim në sigurinë ose rendimentin e pajisjes.
4. Solucionet me sapun të butë nuk përmbajnë përbërës të ashpër dhe nuk shkaktojnë irritim të lëkurës. Ato nuk duhet të përmbajnë aroma, vajra apo alkoole. Dezinfektuesit e duarve nuk janë të miratuar për përdorim.
5. Antigermix E1 mund t'i çngjyrosë pjesët plastike të transduktorëve transezofagalë.
6. Për solucionet specifike që përdoren me këtë reprocesor të automatizuar, shihni [“Udhëzimet për Reprocesorët e automatizuar \(AR\)” në faqen 18](#).
7. Për solucionet specifike që përdoren me këtë reprocesor të automatizuar, shihni [“Udhëzimet për dezinfektuesit e transduktorit të automatizuar TEE dhe dezinfektuesit pastrues” në faqen 21](#).
8. Miratuar vetëm për kabllot; nuk është miratuar për bashkuesit.
9. Për solucionet specifike që përdoren me këtë reprocesor të automatizuar (vetëm transduktorët transvaginalë dhe transrektalë), shihni [“Udhëzimet për Reprocesorët e automatizuar \(AR\)” në faqen 18](#).

www.philips.com/healthcare



Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

CE 2797



© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Riprodhimi ose transmetimi plotësisht ose pjesërisht, në ndonjë formë ose përmes ndonjë mënyre, elektronike, mekanike ose ndryshe, është i ndaluar pa pëlqimin paraprak me shkrim të pronarit të së drejtës së autorit.

Botuar në SHBA
4535 621 08721_B/795 * AUG 2021 - sq-AL